

BLACK-ACTION

Zum Grobabtragen und Formen von Amalgam und Gold
Coarse removing and shaping of amalgam and gold

7.000 - 12.000 min⁻¹



REF	PM0932	PM0933	PM0935	PM0939	PM0953
Ø / L (in mm)	4,5 / 12	3 / 7,5	7 / 10	11 / 2,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	RA	RA	FG
	10	10	10	10	10

BROWN-ACTION

Zum Glätten von Gold, Amalgam und Komposit
Smoothing of gold, amalgam and composite.

7.000 - 12.000 min⁻¹



REF	PM0032	PM0033	PM0035	PM0039	PM0053
Ø / L (in mm)	4,5 / 12	3 / 7,5	7 / 10	3 / 7,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	RA	RA	FG
	10	10	10	10	10

GREEN-ACTION

Zum Hochglanzpolieren auf Gold, Amalgam und Komposit
High-shine polishing of gold, amalgam and composite.

7.000 - 12.000 min⁻¹



REF	PM0132	PM0133	PM0135	PM0139	PM0153
Ø / L (in mm)	4,5 / 12	3 / 7,5	7 / 10	3 / 7,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	RA	RA	FG
	10	10	10	10	10

Anwendungshinweis / Recommendations for use

1. Stufe **BLACK-ACTION**
 arbeitet abrasiv und ist bestens zum schmelzschonenden Anpassen des Füllungsrandes geeignet.
 Gute Ergebnisse werden auch bei der Zahnreinigung erzielt.

1. Step **BLACK-ACTION**
 Working abrasive and is suitable especially for enamel protecting adjustment of the filling's edge.
 Good results are also achieved for tooth cleaning.

2. Stufe **BROWN-ACTION**
 dient dem Glätten und Finieren der Füllungen bzw. der Vorpolitur bei der Bearbeitung von Edelmetallen und Amalgam.

2. Step **BROWN-ACTION**
 Serve for smoothing and finishing of fillings or as pre-polishing for the treatment of precious metal and amalgam.

3. Stufe **GREEN-ACTION**
 damit polieren Sie alle Edelmetalle und Amalgam auf Hochglanz. Er erzielt auch auf vielen Compositen sehr gute Poliererergebnisse. Eine niedrige Umdrehungszahl wird empfohlen.

3. Step **GREEN-ACTION**
 High-shine polishing for all precious metals and amalgam. It shows also very good polisher results for a lot of composites. Using low speed is recommended.